

Bedienungsanleitung

Kupplungsadapter für Pulverstrahlgerät

Vorwort

Das Produkt ermöglicht die Adaption per Schnellklick Verfahren für die jeweilige Turbinenkupplung. Sie können Pulverstrahlgeräte mit einem 4-Loch Anschluss verbinden.

Unser Adapter wurde speziell für unser "Power Stream" Modell entwickelt und konzipiert. Probleme mit Fremdmarken können nicht ausgeschlossen werden.

Anwendung

Nehmen Sie das Produkt und betrachten die 4-Loch Kontaktmöglichkeiten.



Vergewissern Sie sich, dass die Anschlüsse passen und richten Adapter und Pulverstrahler passgenau aus.

Nun führen Sie die Kontaktstifte langsam in den Adapter ein und drücken die Produkte bis zur schwarzen Dichtung zusammen.

Nun noch fest verschrauben.

Vorsicht

- Achten Sie auf die zwei kleinen Stifte! (Bruchgefahr)
- Dies sollte leicht und ohne Widerstand funktionieren!
- Niemals mit Gewalt!



Zur Erleichterung können Sie auch eine Schmierung verwenden!

Verbindung Turbinenkupplung

Sie können den Pulverstrahler einfach aufstecken.
Ruhig etwas kräftiger Drücken. Sie hören ein Klicken.



Bei Problemen Händler kontaktieren!!

Hilfestellung

Fehler	Mögliche Ursache	Lösung
Adapter/Pulverstrahler hat Spielraum	<ol style="list-style-type: none">1. Falsch verschraubt2. Gewinde dreckig3. Gewinde Strahler defekt/inkompatibel	<ol style="list-style-type: none">1. Festziehen2. Gewinde Strahler reinigen + ölen3. Anderen Strahler verwenden
Adapter passt nicht auf Turbinenkupplung	<ol style="list-style-type: none">1. Falsches Fabrikat	<ol style="list-style-type: none">1. Fabrikat prüfen
Wasseraustritt Adapter/Strahler	<ol style="list-style-type: none">1. Falsch verschraubt2. Dichtung Strahler	<ol style="list-style-type: none">1. Festziehen2. Dichtung wechseln
Wasseraustritt Turbinenkupplung	<ol style="list-style-type: none">1. Dichtung Kupplung	<ol style="list-style-type: none">1. Kupplung wechseln2. Dichtung wechseln

Haftung

Keine Haftung bei unsachgemäßen Gebrauch und Nichtbeachtung der Anleitung. Ebenso nicht bei Schäden oder Garantieverlust an gekoppelten Produkten.

Bitte prüfen Sie dies in Ihren jeweiligen Garantiebestimmungen.



Garantie

Smart´n Easy gibt 2 Jahre Garantie. Abweichende Vereinbarungen ausgenommen. Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen.

Technische Daten

Material: Edelstahl; Temperatur Autoklav: 135°C

Hersteller

Smart´n Easy e.K. - Lindenschmitstrasse 4 - 81371 München

Mail: smart-n-easy@gmx.net -Web: www.smart-n-easy.net